

EIS

Entdecke Deine Sinnlichkeit

Gebrauchsanweisung zu Deinem Gleitmittel

WICHTIG! Bitte lies diese Anleitung vor der ersten Ingebrauchnahme des Produktes aufmerksam und vollständig durch und beachte insbesondere die Warn- und Sicherheitshinweise. Bewahre diese Anleitungsbroschüre auf, da sie wichtige Informationen zum sicheren Gebrauch sowie zu technischen und gesetzlichen Informationspflichten enthält, die auch zu einem späteren Zeitpunkt wichtig für Dich sein könnten.

Anwendung: Das Gleitmittel wird einfach großzügig im äußeren Intimbereich und auf den Liebeskugeln verteilt. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir ein gründliches Händewaschen vorab. Das Gleitmittel ist auf Wasserbasis. Das bedeutet, es verursacht kein klebriges Gefühl und ist vollständig mit Wasser abwaschbar, es kann aber leicht eintrocknen. Außerdem kann es mit allen Lovetoys verwendet werden, egal aus welchem Material die Toys sind.

Informationen zum Gleitmittel: Das öl- und fettfreie Gleitmittel ist ein Medizinprodukt zur Anwendung auf der Haut, im Intimbereich, mit allen Kondomen und allen Lovetoys. Es erfüllt die strengen Anforderungen der europäischen „Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte“ und des deutschen „Medizinproduktegesetzes“. Seine Qualität hat es durch die ausgewählten Rohstoffe, kontrollierte Fertigungsprozesse und umfangreiche Prüfungen erhalten. Es ist auf Haut- und Schleimhautverträglichkeit positiv getestet, die Kondomverträglichkeit ist nachgewiesen.

Sonstige Hinweise: Gleitmittel vermindern die Reibung und verbessern gleichzeitig die Gleitfähigkeit, weshalb wir sie sowohl beim Geschlechtsverkehr als auch bei der Verwendung mit Toys empfehlen. Schmerzen und leichten Verletzungen im empfindlichen Intimbereich kann so vorgebeugt werden, außerdem ist die Verwendung von Kondomen durch die verminderte Reibung sicherer.

Schwangerschaftsverhütung und Schutz vor Infektionen: Das Gleitmittel ist kein empfängnisverhütendes Mittel, enthält keine spermiziden Wirkstoffe und bietet keinen Infektionsschutz.

Bei Kinderwunsch: Gynäkologen empfehlen, Gleitmittel bei Kinderwunsch nur sparsam einzusetzen oder zur Sicherheit ganz darauf zu verzichten, da die Empfängnis erschwert werden könnte.

Informiere Dich in der Kennzeichnung des Produkts unter „Ingredients (INCI)“ über unverträgliche oder allergieauslösende Stoffe. Wenn Unverträglichkeiten auftreten, entferne das Produkt bitte wie oben beschrieben und konsultiere gegebenenfalls einen Arzt.

Spezifikationen zu 210799DR

Inhalt (in ml): 50

Ingredients (INCI): Aqua, Propylene Glycol, Hydroxypropyl Methylcellulose, Zingiber O cinale Extract, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Potassium Sorbate, Levulinic Acid, Sodium Levulinate, Glycerin, Menthol, Citric Acid.

Sollten bei der Verwendung des Produkts Probleme auftauchen, wende Dich bitte an unseren Kundensupport, der Dich bei Deinen Schwierigkeiten gerne unterstützen wird. Kunden in Deutschland nutzen dafür die E-Mail Adresse info@eis.de, Kunden in Österreich die E-Mail Adresse info@eis.at.

CE 0197

Nach Anbruch mindestens 3 Monate haltbar. Beachte das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Flasche.

Triple A Import GmbH

Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld

E-Mail für Kunden in Deutschland: info@eis.de

E-Mail für Kunden in Österreich: info@eis.at