

# EIS

*Entdecke Deine Sinnlichkeit*

## Gebrauchsanweisung zu Deiner Menstruationstasse

**WICHTIG! Bitte lies diese Anleitung vor der ersten Ingebrauchnahme des Produktes aufmerksam und vollständig durch und beachte insbesondere die Warn- und Sicherheitshinweise. Bewahre diese Anleitungsbroschüre auf, da sie wichtige Informationen zum sicheren Gebrauch sowie zu technischen und gesetzlichen Informationspflichten enthält, die auch zu einem späteren Zeitpunkt wichtig für Dich sein könnten.**

Anwendung: Die Menstruationstasse ist ein Hygieneartikel für Deine monatliche Blutung. Bevor Du die Menstruationstasse einsetzt, solltest Du Dir gründlich die Hände waschen und die Tasse mit Wasser befeuchten. Setze oder stelle Dich bequem hin (wir empfehlen die Hocke). Um die Menstruationstasse einzusetzen gibt es verschiedene Falttechniken. Wir empfehlen die C-Faltung - auch Herz-Faltung genannt. Hierfür drückst Du die Menstruationstasse zusammen und faltest sie dann noch einmal. Jetzt kannst Du die Tasse im gefalteten Zustand in die Scheide einführen. Achte darauf, sie nicht so tief einzuführen wie einen Tampon. Das Ende sollte am Scheideneingang noch tastbar sein. Spüre dann in Dich hinein, ob die Menstruationstasse angenehm sitzt. Hast Du sie richtig eingeführt, ist der kelchförmige Becher entfaltet und kaum noch spürbar. Die Menstruationsflüssigkeit wird dann komplett aufgefangen.

Die Menstruationstasse solltest Du idealerweise nach 8 Stunden entfernen und auswaschen. Wasche Dir hierfür gründlich die Hände. Führe Daumen und Zeigefinger in die Scheide ein und ertaste das Ende der Menstruationstasse, also den kleinen Stiel. Wichtig: Nicht an diesem Stiel ziehen! Denn es kann sich ein Unterdruck gebildet haben, der durch das Ziehen zu Verletzungen führen kann. Greife mit Zeigefinger und Daumen den unteren Teil der Menstruationstasse und drücke ihn leicht zusammen. So löst sich der Unterdruck und Du kannst die Menstruationstasse vorsichtig entfernen.

## Spezifikationen zu Artikelnummer 667011DR

Gewicht (in g): 16

Durchmesser (in mm): 45

Material: Silikon

Reinigungshinweis: Reinige Dein Toy oberflächlich mit einem feuchten Tuch. Nutze danach einen speziellen Reiniger wie ToySterile: Einsprühen, kurz einwirken lassen, mit einem fusselfreien Tuch abwischen.

Bei Fehlern oder Bedienungsschwierigkeiten wende Dich bitte an unseren Kundensupport, der Dich bei Deinen Schwierigkeiten gerne unterstützen wird. Kunden in Deutschland nutzen dafür die E-Mail Adresse [info@eis.de](mailto:info@eis.de), Kunden in Österreich die E-Mail Adresse [info@eis.at](mailto:info@eis.at).

## Warn- und Sicherheitshinweise:

Nicht für Kinder geeignet, außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Benutze das Produkt ausschließlich so, wie in dieser Anleitung beschrieben, nicht zweckentfremden. Wende das Produkt nicht auf verletzter oder gereizter Haut an. Brich die Anwendung ab, wenn Hautirritationen oder sonstiges Unwohlsein/Schmerzen auftreten. Lagere das Produkt bei Zimmertemperatur, zwischen 0°- 40°C, sonst ist die Funktionalität des Produktes nicht länger gegeben. Sicherer und angenehmer Gebrauch immer mit wasserbasiertem Gleitmittel (wie z.B. Waterglide). Verwende keine Gleitmittel, die nicht auf Wasserbasis produziert werden, sonst kann das Material des Toys angegriffen werden. Nicht mit spitzen Gegenständen in das Produkt stechen, nicht ins Feuer werfen. Verwende das Produkt nicht, wenn es mechanische Beschädigungen oder Auffälligkeiten aufweist (Deformation, Risse im Material etc.)

Die Menstruationstasse ist vor oder nach jedem Gebrauch zu reinigen. Nach der Reinigung ist es sehr wichtig, das Material vollständig trocknen zu lassen, bevor das Produkt verstaut wird. Die Anwendung einer Menstruationstasse ist nicht zu empfehlen, wenn Du: eine Spirale trägst, eine Infektion oder Entzündung hast oder gerade entbunden hast. Unter diesen Umständen ist vor Verwendung einer Menstruationstasse unbedingt Rücksprache mit Deinem behandelnden Gynäkologen zu halten.

Hinweis zur Garantie: Wir bieten Dir 10 Jahre Garantie auf unsere Artikel! Sollte innerhalb von 10 Jahren nach Deinem Einkauf im Eifer des Gefechts doch einmal etwas kaputtgehen, kannst Du die defekte Ware jederzeit an uns zurücksenden und wir erstatten Dir den vollen Kaufpreis zurück. Ausgeschlossen von der Garantiezeit sind Kondome, Gleitmittel, Massageöl, Aphrodisiaka und Aktionsprodukte. Durch diese Garantie werden Deine gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht eingeschränkt. Zudem geben wir Dir nach Ablauf des gesetzlich vorgeschriebenen 14-tägigen Widerrufsrechts ein zusätzliches 365-Tage Geld-Zurück-Versprechen auf alle Artikel!

# EIS

*Entdecke Deine Sinnlichkeit*

Triple A Import GmbH

Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld

E-Mail für Kunden in Deutschland: [info@eis.de](mailto:info@eis.de)

E-Mail für Kunden in Österreich: [info@eis.at](mailto:info@eis.at)