



DUAL FOOT SMOOTHENER | 8 IN 1

-  Professional Pedi Care & VelvetSole System
-  Dry and Dead Cell Removing System
-  Ultra-Gentle Callus Removal
-  Painless Exfoliation System
-  Easy-Exchange Head
-  Long-Lasting Stone
-  Textured Nano-Crystalline Glass
-  Versatile Wet & Dry Use



**Create your personal
Skincare Routine**
and Download our GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com



GUT ZU WISSEN

TIPP 01

Der Bimsstein sollte immer auf nasser Haut angewendet werden. Weiche Deine Füße vor der Anwendung 5–10 Minuten in Wasser ein.

TIPP 02

Die Seite mit dem Nanokristallglas kann auf nasser und trockener Haut verwendet werden.

TIPP 03

Reinige Dein Gerät nach jeder Anwendung mit unserem Bio Gerätecleaner.



Bimsstein

Intensives Peeling



Nano-Kristallglas

Sanftes Peeling

DIE ERSTEN SCHRITTE

Ein absolutes Must-Have für seidenweiche Füße: Der Dual Foot Smoother | 8 in 1 besitzt leicht austauschbare, hochwertige Bimsstein- und Nanokristallglas-Aufsätze, die Deine Füße weich und frei von Hornhaut machen.



SANFTES, GRÜNDLICHES PEELING

VORBEREITEN

Das strukturierte Nanokristallglas ist perfekt für die Anwendung auf nasser oder trockener Haut geeignet. Für die besten Ergebnisse weiche Deine Füße vor der Anwendung einige Minuten in einem warmen Bad ein.

PEELING

Reibe das strukturierte Nanokristallglas mit leichtem Druck und kreisenden oder seitlichen Bewegungen über die schwierigen und rauen Stellen Deiner Füße.

ZWISCHENSTOPP

Spüle Deine Füße regelmäßig ab, um mögliche Rückstände zu entfernen und Deinen Fortschritt zu überprüfen. So vermeidest Du ein übermäßiges Peeling.

FERTIG

Spüle Deine Füße gründlich ab und trockne sie anschließend. Trage danach eine Feuchtigkeitscreme auf. Spüle das Gerät nach jedem Gebrauch mit Wasser ab und besprühe es mit unserem Bio Gerätereiniger.



GEZIELTE ENTFERNUNG VON HORNHAUT

VORBEREITEN

Verwende den langlebigen Stone für eine intensivere Exfoliation, um raue Haut zu glätten und Schwielen zu entfernen.

FERSEN

Durch Reibung der Schuhe und Druck beim Stehen oder Sitzen bilden sich oft Schwielen an den Fersen. Setze den langlebigen Stein sanft an die Ferse und reibe mit leichtem Druck über die betroffene Stelle.

ZEHEN

Hornhaut bildet sich oft dort, wo Zehen aneinander oder an den Seiten der Schuhe reiben. Mit dem Professional Pedi Care & VelvetSole System poliere Deine Zehen, bis sie samtweich sind.

FERTIG

Spüle Deine Füße gründlich ab und trockne sie anschließend. Trage danach eine Feuchtigkeitscreme auf. Spüle das Gerät nach jedem Gebrauch mit Wasser ab und besprühe es mit unserem Bio Gerätereiniger.

Erstelle Deine persönliche Hautpflegeroutine

und lade unsere GESKE App herunter



Erweiterte
App



Mit Video
Guide



KI-gestützter
Skin Scan



Experten-
tips



Persönlicher
Guide



In-App
Belohnungen



WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN. VOR GEBRAUCH LESEN.

Lies vor dem ersten Gebrauch die Sicherheitshinweise. Bewahre beide Gebrauchsanweisungen auf.

Dein Produkt im Überblick

Dein Produkt ist eine manuelle Fußfeile. Du kannst sie sicher bis zu einmal pro Tag verwenden. Bitte nicht häufiger verwenden.

Hinweise zur Anwendung:

Vor der ersten Benutzung des Geräts müssen diese Sicherheitshinweise und das Bedienungsanleitung vollständig gelesen werden. Bewahre beide Dokumente gut auf, da sie wichtige Informationen zur sicheren Anwendung sowie zu technischen und rechtlichen Anforderungen enthalten. Das Gerät ist ein Hautpflegeprodukt für Erwachsene und kein Medizinprodukt oder Produkt mit medizinischer oder anderer heilender Wirkung.

Technische Daten

Materialien: ABS, Keramik-Bimsstein, Glas, Silikon | **Lagertemperatur:** -5 – +60 °C / 23 – 140 °F

Weitere Informationen zur Nutzung:

- Dieses Produkt dient nicht der Behandlung medizinischer Anwendungsgebiete oder Krankheiten wie Fußpilz. Falls Du unter Hautbeschwerden oder -erkrankungen leidest, konsultiere vor der Anwendung bitte Deine Dermatolog:in.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es 1) beschädigt oder verformt ist oder 2) sich verfärbt hat.
- Falls während der Anwendung Schmerzen oder Unbehagen auftreten, stoppe sofort und suche ärztlichen Rat.
- Aus Gründen der Hygiene empfehlen wir, Dein Produkt nicht mit anderen zu teilen und die Aufsätze bei Bedarf zu ersetzen.
- Dieses Produkt ist für die kosmetische Anwendung an den Füßen gedacht. GESKE übernimmt keine Haftung für gesundheitsschädigende Folgen aus der Anwendung an anderen Körperstellen oder bei unsachgemäßer Verwendung.
- Dieses Produkt ist ausschließlich zur Entfernung von Hornhaut geeignet. Um Verletzungen zu vermeiden, nimm Dir Zeit, um Dich an das Gerät zu gewöhnen und arbeite anfangs sehr vorsichtig. Verwende das Produkt nicht auf gesunder, weicher Haut, lasse es nie zu lange auf einer Stelle und übe beim Gebrauch keinen starken Druck aus.
- Die verschiedenen Aufsätze lassen sich einfach durch ein Klicksystem austauschen.
- Nach jedem Gebrauch solltest Du den Aufsatz vom Gerät lösen und gründlich mit lauwarmem Wasser und unserem Bio-Gerätereiniger reinigen. Um Schimmelbildung zu vermeiden, solltest Du die Aufsätze und das Gerät getrennt trocknen lassen.

- Verwende das Produkt nicht auf gereizter oder verletzter Haut, offenen Wunden oder bei Pilz-, Bakterien- oder Virusinfektionen (weder im Anwendungsbereich noch anderswo).
- Dieses Gerät ist wasserdicht. Die Anwendung des Bimssteins sollte immer auf feuchter Haut erfolgen. Die Seite mit dem nanokristallinen Glas kann sowohl auf feuchter als auch auf trockener Haut verwendet werden.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Warnhinweise

Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Anwendung!

Verwende das Produkt nur wie in der Kurzanleitung und den Videoanweisungen beschrieben. Solltest Du dennoch Fragen haben, wende Dich bitte an unseren Kundensupport unter support@geske.com.

Verletzungsgefahr für Kinder!

Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Haftungsbeschränkung

Für Schäden, die auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten der GESKE Beauty Tech GmbH, eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen, haften die GESKE Beauty Tech GmbH und/oder deren Einzelhändler nach den gesetzlichen Bestimmungen. Mit Ausnahme von Verletzungen von Leben, Körper oder Gesundheit und wesentlichen Vertragspflichten (Kardinalpflichten) haften die GESKE Beauty Tech GmbH bzw. deren Einzelhändler nur für Schäden, die auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten beruhen. Dies gilt auch für mittelbare Schäden, insbesondere entgangenen Gewinn. Im Übrigen ist die Haftung gegenüber Verbraucher:innen wegen einer übernommenen Garantie, außer bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten oder bei Verletzungen von Leben, Körper oder Gesundheit und wesentlichen Vertragspflichten (Kardinalpflichten), auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren typischen Schaden sowie der Höhe nach auf den vertragstypischen Durchschnittsschaden begrenzt. Dies gilt auch für mittelbare Schäden, insbesondere entgangenen Gewinn. Gegenüber Unternehmer:innen ist die Haftung, außer im Falle der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit oder bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten, auf die typischen, vorhersehbaren Schäden bei Vertragsschluss sowie deren vertragstypische Durchschnittshöhe begrenzt. Dies gilt auch für mittelbare Schäden, insbesondere entgangenen Gewinn. Keine Haftung wird übernommen für Schäden durch: Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung / Unsachgemäßen Gebrauch / Unbefugte Änderungen / Technische Modifikationen / Verwendung nicht genehmigter Ersatzteile / Verwendung nicht genehmigten Zubehörs. Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.